

Kontaktlinseguide for Proclear® 1 day multifocal

Forskjellige kunder. En enkel prosess for valg av linser.

En unik metode som gjør det enkelt å velge linser.

- sentral lesedel med asfærisk design
- utformet med enstyrkeprofil
 - bevarer avstandssynet, slik at de i liten grad blir nødvendig med kompromisser
- «near boost» på det ikke-dominante øyet
 - gir optimalt syn på nært og mellomlangt hold og bevarer binokulærsynet
 - passer for brukere med addisjoner opptil +2,50
- gir en totalt sett mer naturlig synsopplevelse

Veiledning for valg av linser

Trinn 1 Bekreft refraksjonen og fastsett øyedominansen.

Trinn 2 Dominant øye: Velg en linse med passende avstandsrefraksjon.

Ikke-dominant øye: Velg en linse med anbefalt «near boost» addert til avstandsstyrken, i henhold til brukerens addisjonskrav:

Kundens addisjon	«Near boost»
Opptil +1,00	Krever ingen «near boost»
+1,25 til +1,75	+0,75 D
+2,00 til +2,50	0,75 D til +1,00 D

Eksempel på refraksjon: –2,00 OU med addisjon på +1,75

Proclear 1 day multifocal Lens Rx

Dominant øye

Ikke-dominant øye

-2,00


-1,25

Trinn 3 La linsene sitte i en stund før synet bedømmes. Hvis kunden er fornøyd med synet, kan du levere ut linsene.

Optimeringstips

For å forbedre avstandssynet kan du utføre en overrefraksjon i trinn på +/-0,25 D på det dominante øyet i trinn 2 kan forbedre avstandssynet.

For å forbedre synet på nært hold kan du utføre en overrefraksjon i trinn på +/-0,25 D på det ikke-dominante øyet under binokulære forhold.

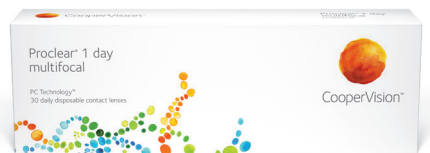

En innovativ metode. Flere grunner til å velge Proclear.

Forbedrer synet på nært hold uten å påvirke avstandssynet.

- Enkel tilpasning for linsebrukere med forskjellige stadier av presbyopi.
 - utformet med enstyrkeprofil
 - mindre behov for å gå på akkord med avstandssynet
- Linsen har en utforming som gjør den enklere å tilpasse.
 - reduserer tiden hos optikeren og antallet oppfølgingsbesøk
- Et stort og effektivt parameterintervall.
- En ny metode for å dekke synsbehovene hos brukere av endagslinser.

Forskjellige kunder. Én Proclear.

Behandler de to øynene separat samtidig som okulærsynet ivaretas

- Det benyttes forskjellig styrke på hvert øye for å forbedre synet på nært hold samtidig som du i mindre grad trenger å gå på akkord med avstandssynet.
- Sender separate signaler til hvert øye, slik at hjernen kan skape et bedre bilde.

En stor forbedring i forhold til monovisjon

- Beholder den binokulære summasjonen ved høyere addisjoner og gir bedre synsevne enn monovisjon.
- Forbedrer samsynet, synet på mellomlangt hold og mørkesynet.
- Multifokal linsedesign

Produktspesifikasjoner

Proclear 1 day multifocal

Styrke	+6,00 til -10,00 (trinn på 0,25; 0,50 etter -6,00)
Addisjon	utformet med enstyrkeprofil
Basiskurve	8,7 mm
Diameter	14,2 mm

